

Előnyök és tulajdonságok:

- ✓ A glukózt fermentáló és nem fermentáló Gram-negatív pálcák meghatározása egy azonosító rendszerrel
- ✓ Magas azonosító hatékonyság
- ✓ Szobahőmérsékleten tárolható
- ✓ Hosszú szavatosság és magas stabilitás
- ✓ Aktuális rendszertan
- ✓ Innovatív rendszer, amely lehetővé teszi a reagens élküli használatot és bifunkciós tesztek alkalmazását
- ✓ 25 - 29 teszt
- ✓ Egységes sűrűségű baktérium-szuszpenzió fermentáló és nem fermentáló pálcák
- ✓ Inokulációs folyadék nélkül
- ✓ Inkubáció 35±2°C - on
- ✓ Értékelés 24 óra után
- ✓ Külső független tesztelés

A készlet tartalma - 40 teszt:

- ✓ 10 mikrotiter lemez
- ✓ 40 értékelő lap
- ✓ 10 inkubációs tasak
- ✓ 1 tájékoztató

A diagnosztikai készlethez javasolt megvásárolni:

NIT reagens (Ref. 3005)

Kötelező teszt:

OXI (Ref. 2001)


Bifunkciós tesztek:

IND reagens (Ref. 3002), PHE reagens (Ref. 3007),
PHS reagens (Ref. 3008)

Kiegészítő tesztek:

VP (Ref. 2004) és VP reagens (Ref.3004),
PYR (Ref. 2003) és PYR reagens (Ref.3003), ONP (Ref. 2005)

Vázlatos munkamenet:

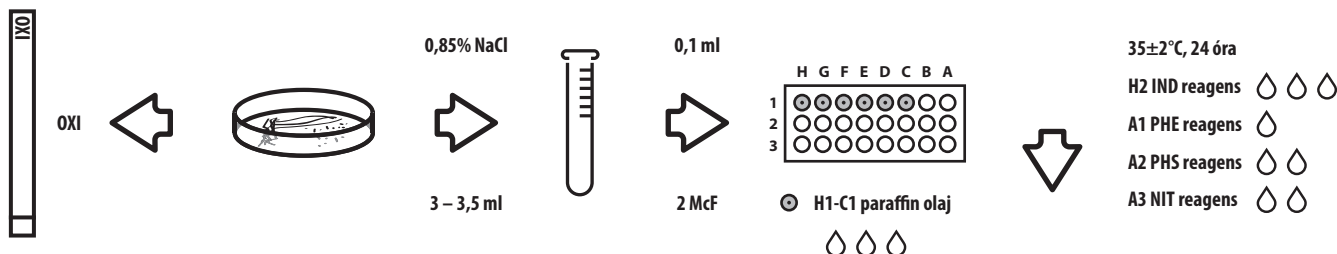

H'	H	G	F	E	D	C	B	A	A'	
	1	URE	GLU	H2S	ARG	ORN	LYS	SCI	bGL	PHE
	+									
	-									
IND	2	NAG	SUC	TRE	MAN	LAC	CEL	MAL	GGT	PHS
+										
-										
GLR	3	ESL	DUL	ADO	SOR	RHA	RAF	INO	bGA	NIT
+										
-										

