

CODE BOOK

NEISS 8

A code book is an identification tool that allows the customer to perform a test result evaluation using a numeric code.

Kodová kniha je identifikační pomůcka, která umožňuje provést vyhodnocení výsledku testu pomocí numerického kódu.

The principle of code creation / Princip tvorby kódu:

Tests are grouped into triples, wherein the negative results is assigned a value of 0 and positive results, then the following values:

Testy jsou rozděleny do trojic, kde negativním výsledkům je přiřazena hodnota 0 a pozitivním výsledkům pak následující hodnoty:

1. test in triple / test v trojici: 1
2. test in triple / test v trojici: 2
3. test in triple / test v trojici: 4

	SPS	GLU	MLT	FRU	SUC	LAC	GGT	TRB
-	0	0	0	0	0	0	0	0
+	1	2	4	1	2	4	1	2

The sum of the values obtained in all tripples is used to generate the final code.
Součet obdržných hodnot všech trojic testů se použije pro tvorbu finálního kódu.

e.g. / např.

SPS GLU MLT FRU SUC LAC GGT TRB
 - + + + - + + -
 6 5 1

The final code is 651. By searching for the code we will find the result of the identification itself. The pdf can be searched for (ctrl + f) and you do not have to browse the entire code book sequentially. If no code was found, it means that the identification result was less than 60% and the data obtained can not be used as the final identification result.

Finální kód je tedy 651. Vyhledáním kódu zjistíme samotný výsledek identifikace. V pdf lze hledat (ctrl + f) a není nutné procházet celou kódovou knihu postupně. Nebyl-li nalezen kód, znamená to, že výsledek identifikace byl nižší než 60 % a získaná data se nedají použít jako finální výsledek identifikace.

code	kód		result / výsledek	ID %
0	0	0	<i>Neisseria cinerea / Neisseria elongata</i>	93
0	0	2	<i>Moraxella catarrhalis</i>	96
0	4	0	<i>Neisseria cinerea / Neisseria elongata</i>	60
0	2	0	<i>Neisseria cinerea / Neisseria elongata</i>	98
0	2	2	<i>Moraxella catarrhalis</i>	66
0	2	1	<i>Neisseria cinerea / Neisseria elongata</i>	68
0	2	3	<i>Neisseria cinerea / Neisseria elongata</i>	61
0	6	0	<i>Neisseria cinerea / Neisseria elongata</i>	76
0	6	2	<i>Neisseria cinerea / Neisseria elongata</i>	73
0	6	1	<i>Neisseria cinerea / Neisseria elongata</i>	73
0	6	3	<i>Neisseria cinerea / Neisseria elongata</i>	76
0	1	0	<i>Neisseria cinerea / Neisseria elongata</i>	98
0	1	2	<i>Moraxella catarrhalis</i>	66
0	1	1	<i>Neisseria cinerea / Neisseria elongata</i>	68
0	1	3	<i>Neisseria cinerea / Neisseria elongata</i>	61
0	5	0	<i>Neisseria cinerea / Neisseria elongata</i>	76
0	5	2	<i>Neisseria cinerea / Neisseria elongata</i>	74
0	5	1	<i>Neisseria cinerea / Neisseria elongata</i>	73
0	5	3	<i>Neisseria cinerea / Neisseria elongata</i>	75
0	3	0	<i>Neisseria cinerea / Neisseria elongata</i>	99
0	3	2	<i>Neisseria cinerea / Neisseria elongata</i>	84
0	3	1	<i>Neisseria cinerea / Neisseria elongata</i>	79
0	3	3	<i>Neisseria cinerea / Neisseria elongata</i>	79
0	7	0	<i>Neisseria cinerea / Neisseria elongata</i>	86
0	7	2	<i>Neisseria cinerea / Neisseria elongata</i>	90
0	7	1	<i>Neisseria cinerea / Neisseria elongata</i>	79
0	7	3	<i>Neisseria cinerea / Neisseria elongata</i>	82
4	0	1	<i>Neisseria meningitidis</i>	95
4	0	3	<i>Neisseria meningitidis</i>	95
4	4	0	<i>Neisseria lactamica</i>	98
4	4	2	<i>Neisseria lactamica</i>	96
4	4	1	<i>Neisseria lactamica</i>	65
4	2	1	<i>Neisseria meningitidis</i>	90
4	2	3	<i>Neisseria meningitidis</i>	91
4	6	0	<i>Neisseria lactamica</i>	95
4	6	2	<i>Neisseria lactamica</i>	92
4	6	1	<i>Neisseria lactamica</i>	62
4	1	0	<i>Neisseria cinerea / Neisseria elongata</i>	64
4	1	2	<i>Neisseria cinerea / Neisseria elongata</i>	63
4	1	1	<i>Neisseria meningitidis</i>	87
4	1	3	<i>Neisseria meningitidis</i>	88
4	5	0	<i>Neisseria lactamica</i>	95
4	5	2	<i>Neisseria lactamica</i>	92
4	7	0	<i>Neisseria lactamica</i>	80
4	7	2	<i>Neisseria lactamica</i>	72
4	7	1	<i>Neisseria sicca / Neisseria subflava / Neisseria mucosa</i>	62
4	7	3	<i>Neisseria sicca / Neisseria subflava / Neisseria mucosa</i>	66

2	0	0	<i>Neisseria gonorrhoeae</i>	86
2	0	1	<i>Neisseria meningitidis</i>	85
2	0	3	<i>Neisseria meningitidis</i>	90
2	4	0	<i>Neisseria lactamica</i>	64
2	4	2	<i>Neisseria lactamica</i>	63
2	4	1	<i>Neisseria meningitidis</i>	65
2	4	3	<i>Neisseria meningitidis</i>	72
2	2	2	<i>Neisseria cinerea / Neisseria elongata</i>	75
2	2	1	<i>Neisseria meningitidis</i>	82
2	2	3	<i>Neisseria meningitidis</i>	83
2	6	3	<i>Neisseria meningitidis</i>	62
2	1	2	<i>Neisseria cinerea / Neisseria elongata</i>	74
2	1	1	<i>Neisseria meningitidis</i>	79
2	1	3	<i>Neisseria meningitidis</i>	81
2	3	0	<i>Neisseria cinerea / Neisseria elongata</i>	64
2	3	2	<i>Neisseria cinerea / Neisseria elongata</i>	71
2	7	1	<i>Neisseria sicca / Neisseria subflava / Neisseria mucosa</i>	72
2	7	3	<i>Neisseria sicca / Neisseria subflava / Neisseria mucosa</i>	71
6	0	1	<i>Neisseria meningitidis</i>	99
6	0	3	<i>Neisseria meningitidis</i>	99
6	4	0	<i>Neisseria lactamica</i>	99
6	4	2	<i>Neisseria lactamica</i>	98
6	4	3	<i>Neisseria meningitidis</i>	63
6	2	0	<i>Neisseria polysaccharea</i>	71
6	2	1	<i>Neisseria meningitidis</i>	90
6	2	3	<i>Neisseria meningitidis</i>	92
6	6	0	<i>Neisseria lactamica</i>	90
6	6	2	<i>Neisseria lactamica</i>	90
6	1	1	<i>Neisseria meningitidis</i>	74
6	1	3	<i>Neisseria meningitidis</i>	76
6	5	0	<i>Neisseria lactamica</i>	91
6	5	2	<i>Neisseria lactamica</i>	87
6	3	0	<i>Neisseria sicca / Neisseria subflava / Neisseria mucosa</i>	87
6	3	2	<i>Neisseria sicca / Neisseria subflava / Neisseria mucosa</i>	91
6	3	1	<i>Neisseria sicca / Neisseria subflava / Neisseria mucosa</i>	88
6	3	3	<i>Neisseria sicca / Neisseria subflava / Neisseria mucosa</i>	87
6	7	0	<i>Neisseria sicca / Neisseria subflava / Neisseria mucosa</i>	62
6	7	2	<i>Neisseria sicca / Neisseria subflava / Neisseria mucosa</i>	72
6	7	1	<i>Neisseria sicca / Neisseria subflava / Neisseria mucosa</i>	94
6	7	3	<i>Neisseria sicca / Neisseria subflava / Neisseria mucosa</i>	95
1	4	2	<i>Neisseria cinerea / Neisseria elongata</i>	63
1	4	1	<i>Neisseria cinerea / Neisseria elongata</i>	62
1	4	3	<i>Neisseria cinerea / Neisseria elongata</i>	69
1	2	2	<i>Neisseria cinerea / Neisseria elongata</i>	62
1	2	3	<i>Neisseria cinerea / Neisseria elongata</i>	65
1	6	2	<i>Neisseria cinerea / Neisseria elongata</i>	68
1	6	3	<i>Neisseria cinerea / Neisseria elongata</i>	66
1	1	0	<i>Neisseria cinerea / Neisseria elongata</i>	66
1	1	2	<i>Neisseria cinerea / Neisseria elongata</i>	69
1	5	0	<i>Neisseria cinerea / Neisseria elongata</i>	66

1	5	2	<i>Neisseria cinerea / Neisseria elongata</i>	74
1	3	1	<i>Neisseria sicca / Neisseria subflava / Neisseria mucosa</i>	85
1	3	3	<i>Neisseria sicca / Neisseria subflava / Neisseria mucosa</i>	85
1	7	1	<i>Neisseria sicca / Neisseria subflava / Neisseria mucosa</i>	93
1	7	3	<i>Neisseria sicca / Neisseria subflava / Neisseria mucosa</i>	92
5	0	0	<i>Neisseria polysaccharea</i>	77
5	0	2	<i>Neisseria polysaccharea</i>	64
5	0	1	<i>Neisseria meningitidis</i>	66
5	0	3	<i>Neisseria meningitidis</i>	74
5	4	0	<i>Neisseria lactamica</i>	76
5	4	2	<i>Neisseria lactamica</i>	76
5	2	0	<i>Neisseria polysaccharea</i>	95
5	2	2	<i>Neisseria polysaccharea</i>	91
5	6	0	<i>Neisseria polysaccharea</i>	77
5	6	2	<i>Neisseria polysaccharea</i>	70
5	6	3	<i>Neisseria sicca / Neisseria subflava / Neisseria mucosa</i>	64
5	1	0	<i>Neisseria sicca / Neisseria subflava / Neisseria mucosa</i>	72
5	1	2	<i>Neisseria sicca / Neisseria subflava / Neisseria mucosa</i>	80
5	1	1	<i>Neisseria sicca / Neisseria subflava / Neisseria mucosa</i>	93
5	1	3	<i>Neisseria sicca / Neisseria subflava / Neisseria mucosa</i>	93
5	5	0	<i>Neisseria sicca / Neisseria subflava / Neisseria mucosa</i>	62
5	5	2	<i>Neisseria sicca / Neisseria subflava / Neisseria mucosa</i>	71
5	5	1	<i>Neisseria sicca / Neisseria subflava / Neisseria mucosa</i>	96
5	5	3	<i>Neisseria sicca / Neisseria subflava / Neisseria mucosa</i>	97
5	3	0	<i>Neisseria sicca / Neisseria subflava / Neisseria mucosa</i>	81
5	3	2	<i>Neisseria sicca / Neisseria subflava / Neisseria mucosa</i>	89
5	3	1	<i>Neisseria sicca / Neisseria subflava / Neisseria mucosa</i>	99
5	3	3	<i>Neisseria sicca / Neisseria subflava / Neisseria mucosa</i>	99
5	7	0	<i>Neisseria sicca / Neisseria subflava / Neisseria mucosa</i>	89
5	7	2	<i>Neisseria sicca / Neisseria subflava / Neisseria mucosa</i>	94
5	7	1	<i>Neisseria sicca / Neisseria subflava / Neisseria mucosa</i>	99
5	7	3	<i>Neisseria sicca / Neisseria subflava / Neisseria mucosa</i>	100
3	0	0	<i>Neisseria flavescens</i>	93
3	0	2	<i>Neisseria flavescens</i>	92
3	0	1	<i>Neisseria flavescens</i>	78
3	0	3	<i>Neisseria flavescens</i>	65
3	4	0	<i>Neisseria flavescens</i>	84
3	4	2	<i>Neisseria flavescens</i>	80
3	4	1	<i>Neisseria flavescens</i>	66
3	2	0	<i>Neisseria polysaccharea</i>	78
3	2	2	<i>Neisseria polysaccharea</i>	75
3	6	0	<i>Neisseria polysaccharea</i>	79
3	6	2	<i>Neisseria polysaccharea</i>	73
3	6	3	<i>Neisseria sicca / Neisseria subflava / Neisseria mucosa</i>	64
3	1	0	<i>Neisseria flavescens</i>	79
3	1	2	<i>Neisseria flavescens</i>	69
3	1	1	<i>Neisseria sicca / Neisseria subflava / Neisseria mucosa</i>	73
3	1	3	<i>Neisseria sicca / Neisseria subflava / Neisseria mucosa</i>	81
3	5	1	<i>Neisseria sicca / Neisseria subflava / Neisseria mucosa</i>	91
3	5	3	<i>Neisseria sicca / Neisseria subflava / Neisseria mucosa</i>	94

3	3	0	<i>Neisseria sicca / Neisseria subflava / Neisseria mucosa</i>	77
3	3	2	<i>Neisseria sicca / Neisseria subflava / Neisseria mucosa</i>	86
3	3	1	<i>Neisseria sicca / Neisseria subflava / Neisseria mucosa</i>	98
3	3	3	<i>Neisseria sicca / Neisseria subflava / Neisseria mucosa</i>	99
3	7	0	<i>Neisseria sicca / Neisseria subflava / Neisseria mucosa</i>	89
3	7	2	<i>Neisseria sicca / Neisseria subflava / Neisseria mucosa</i>	94
3	7	1	<i>Neisseria sicca / Neisseria subflava / Neisseria mucosa</i>	99
3	7	3	<i>Neisseria sicca / Neisseria subflava / Neisseria mucosa</i>	100
7	0	0	<i>Neisseria polysaccharea</i>	83
7	0	2	<i>Neisseria polysaccharea</i>	79
7	4	3	<i>Neisseria sicca / Neisseria subflava / Neisseria mucosa</i>	60
7	2	0	<i>Neisseria polysaccharea</i>	94
7	2	2	<i>Neisseria polysaccharea</i>	89
7	2	3	<i>Neisseria sicca / Neisseria subflava / Neisseria mucosa</i>	69
7	6	0	<i>Neisseria polysaccharea</i>	84
7	6	2	<i>Neisseria polysaccharea</i>	75
7	6	1	<i>Neisseria sicca / Neisseria subflava / Neisseria mucosa</i>	75
7	6	3	<i>Neisseria sicca / Neisseria subflava / Neisseria mucosa</i>	84
7	1	0	<i>Neisseria sicca / Neisseria subflava / Neisseria mucosa</i>	87
7	1	2	<i>Neisseria sicca / Neisseria subflava / Neisseria mucosa</i>	93
7	1	1	<i>Neisseria sicca / Neisseria subflava / Neisseria mucosa</i>	98
7	1	3	<i>Neisseria sicca / Neisseria subflava / Neisseria mucosa</i>	99
7	5	0	<i>Neisseria sicca / Neisseria subflava / Neisseria mucosa</i>	91
7	5	2	<i>Neisseria sicca / Neisseria subflava / Neisseria mucosa</i>	95
7	5	1	<i>Neisseria sicca / Neisseria subflava / Neisseria mucosa</i>	99
7	5	3	<i>Neisseria sicca / Neisseria subflava / Neisseria mucosa</i>	100
7	3	0	<i>Neisseria sicca / Neisseria subflava / Neisseria mucosa</i>	90
7	3	2	<i>Neisseria sicca / Neisseria subflava / Neisseria mucosa</i>	95
7	3	1	<i>Neisseria sicca / Neisseria subflava / Neisseria mucosa</i>	99
7	3	3	<i>Neisseria sicca / Neisseria subflava / Neisseria mucosa</i>	100
7	7	0	<i>Neisseria sicca / Neisseria subflava / Neisseria mucosa</i>	96
7	7	2	<i>Neisseria sicca / Neisseria subflava / Neisseria mucosa</i>	98
7	7	1	<i>Neisseria sicca / Neisseria subflava / Neisseria mucosa</i>	100
7	7	3	<i>Neisseria sicca / Neisseria subflava / Neisseria mucosa</i>	100

Version 1.01 / last update 11.09.2018

Verze 1.01 / poslední aktualizace 11.09.2018